

COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasal)

Non-Intrusive

- Menos doloroso que la prueba de nasofaríngeo
- Fácil de usar, no requiere equipo
- Resultados rápidos en 15 minutos



Benefits

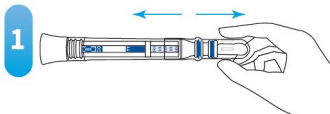
• Rendimiento clínico:

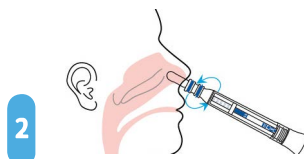
		RT-PCR		Total
		Positivo	Negativo	
COVID-19 Antigen Rapid Test	Positivo	104	1	105
	Negativo	2	401	403
	Total	106	402	508

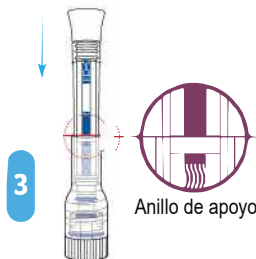
- Sensibilidad relativa: 98.1 % (93.4%~99.5%)*
- Especificidad relativa: 99.8 % (98.6%~100.0%)
- Precisión del test: 98.95 % (98.3%~99.8%)*


* Con 95% Intervalo de confianza


Procedimiento

- 

1. Remover el protector
- 

2. Inserte suavemente el colector nasal hasta encontrar resistencia (aproximadamente 1-2 cm en la fosa nasal). Gire el recolector cinco veces contra la pared nasal y retírelo de la fosa nasal. Repita el procedimiento de recolección de muestras para la otra fosa nasal para asegurarse de que se recolecte suficiente muestra de ambas cavidades nasales.
- 

3. Inserte el dispositivo de prueba verticalmente en el tubo de extracción mientras gira el dispositivo de prueba ligeramente, hasta que el borde del tubo de extracción llegue a la parte superior del anillo de soporte.
- 

4. Lectura de resultados en 15 minutos
- 

5. Resultados:
 Positivo: Una línea roja (C y T)
 Negativo: Dos líneas rojas (C y T)
 Invalido: Ninguna línea roja (solo C o solo T)